

Geltungsbereich: alle Ärzte, Pflegepersonal und Physiotherapeuten im Hause

Die Anwendung der Vacoped- /Vacodiaped-Orthesen von Patienten der Klinik für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie soll abweichend von der beiliegenden Anleitung **ohne** vakuumassistierte Verhärtung des Polsters erfolgen. Dafür ist es erforderlich, dass Luft in das Kissen einströmen kann. Dadurch wird erreicht, dass die Polsterung weicher ist als bei Anwendung nach beiliegender Anleitung. Aufgrund einer Designänderung reicht es nicht mehr den Ventildeckel und die lilafarbene Hülse zu entfernen! Deshalb soll ab sofort der Ventilschaft **UNTERHALB** der lilafarbenen Hülse durchtrennt werden.

